

Douche & Bain

# Rubis

Confort, hygiène et sécurité au rendez-vous des soins et de la toilette.

Douche au lit

REF. 3017.00

Conçue pour la toilette et le bien-être des personnes alitées en institution, la douche au lit Rubis permet de doucher simplement et efficacement les patients dépendants en toute sécurité.



**REVAL**  
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

## Douche & Bain

### Rubis

#### Etape 1



Pour commencer, remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau indiqué.

#### Etape 2



Positionnez l'appareil au bout du lit et sélectionnez une température sur le régulateur de température. Appuyez sur le bouton «chauffage» et attendez que l'appareil atteigne la température désirée (environ 12 min à partir d'eau froide)

#### Etape 3



Étendez la moitié du drap de bain fourni avec l'appareil sur le matelas et laissez l'autre moitié par dessus les barrières de sécurité du lit.

#### Etape 4



Positionnez la protection de lit étanche sous le patient. Elle doit être positionnée de façon la plus uniforme possible et bien attachée aux barrières du lit à l'aide des pinces fournies.

#### Etape 5



Retirer le tuyau d'évacuation de son support et positionnez son extrémité à l'endroit le plus bas du matelas. Retirez les vêtements du patient et vérifiez la température de l'eau avant de doucher le patient.

#### Etape 6



Quand la température de l'eau est conforme, douchez le patient.


#### Etape 7



Une fois le bain terminé, séchez le patient et retirez puis rangez la protection étanche. Revêtir le patient.



#### Etape 8

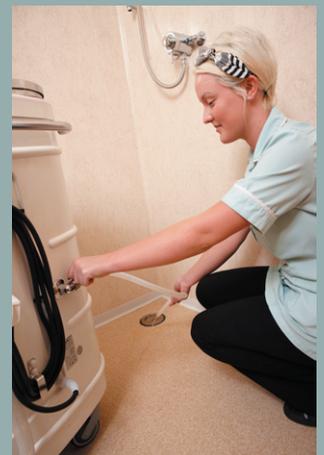

La procédure achevée, videz les bacs eaux propres puis eaux sales dans les toilettes ou siphon de sol. Nettoyez et désinfectez l'appareil selon le protocole.



## Douche & Bain

### Rubis



### POINTS FORTS

- Bacs Inox de grande capacité.
- Robuste pompe d'aspiration des eaux usées à grand débit.
- Régulateur de température IPX4 paramétrable.
- Température sécurisée à 41°C max.
- Habillage en ABS PMMA pour entretien facile.
- Disconnection totale entre circuits eaux propres et usées.
- Evacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés.
- Désinfection thermique des canalisations.

## Douche au lit

REF. 3017.00



- 1 Pupitre de commande
- 2 Bac eaux usées
- 3 Bac eaux propres
- 4 Robinet lave-mains (option 3017.60)
- 5 Lavabo (option 3017.60)
- 6 Bassine de toilette inox (option 3017.60)
- 7 Main courante inox
- 8 Trappe de maintenance

- 9 Bidon de désinfectant sous trappe
- 10 Roulette pivotante avec frein
- 11 Vanne de réglage débit douchette
- 12 Douchette de lavage à gachette (flexible lg: 1,75m)
- 13 Evacuation bac eaux propres
- 14 Evacuation bac eaux usées
- 15 Flexible d'aspiration eau du matelas (lg: 2,4m)
- 16 Prise d'alimentation secteur 230V

Chaque douche au lit Rubis comprend son pupitre mobile autonome avec six roues directionnelles, ses flexibles de douche et d'aspiration des eaux usées, son bidon de désinfectant intégré, 1 protection de matelas pour lit de 90cm, 5 protections de matelas à usage unique pour lit de 90cm, ses 4 pinces de maintien et son drap de bain 158x220cm.

#### DIMENSIONS:

- Hauteur h.t. 106 cm Largeur h.t. 94 cm Profondeur h.t. 58 cm

#### DESCRIPTIF DE LA DOUCHE AU LIT:

- Châssis en alliage d'aluminium.
- Habillages en ABS PMMA.
- 6 roulettes directionnelles Ø100mm, 2 avec freins.
- Mains courantes en acier inoxydable.
- Bac eaux propres en acier inoxydable, capacité 23L.
- Bac eaux usées en acier inoxydable, capacité 23L.
- Pompe de douche 24V, 8 litres/min
- Pompe de vidange 24V, 14 litres/min
- Fonctionnement simultané possible des 2 pompes
- Régulateur électronique de température sécurisé double affichage (température réelle + consigne)
- Voyant alarme eau trop chaude.
- Résistance chauffante 2700W
- Sonde de présence d'eau pour résistance chauffante.
- Disjoncteur différentiel 16A 30mA intégré.
- Eléments électriques dans armoire à porte IPX5.
- Boutons de commande éclairés IP68 basse tension.
- Douchette de lavage avec gachette, débit réglable.
- Bidon de désinfectant sous trappe.
- Tuyauterie en Silicone autoclavable.
- Sonorité: 50dBA / 46dBm

#### DESCRIPTIF DE LA PROTECTION DE MATELAS:

- 13% PES - 87% PVC
- 400gr/m<sup>2</sup>
- Norme feu : ISO14116: Index1



#### CONFORMITÉ:

- Dispositif Médical 93/42/CEE Classe I
- IPX4 - Class 1 - CEI 60601

#### ACCESSOIRES FOURNIS:

- 1 Protection de matelas pour lit de 90cm
- 5 Protections de matelas à usage unique pour lit de 90cm
- 1 Drap de bain 158x220cm 100% coton 400gr/m<sup>2</sup>
- 4 pinces de préhension

## Rubis

## EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

3017.10 / 3017.11



Protection de lit 90 x 190cm ou  
Protection de lit 120 x 200cm  
Matière: polyuréthane et tissu  
enduit.

3017.12



Protection de lit à usage unique.

3017.20



Drap de bain 158 x 200cm  
100% coton 400gr/m<sup>2</sup>

3017.50



Adaptateur de remplissage pour  
col de cygne. (1 adaptateur pour  
robinet, 1 raccord rapide et 1 tuyau  
de 1m50)

3010.92



Désinfectant concentré BFR4.0 1L  
Dilué à 0.4%, 1L de BFR4.0 produit  
25L de solution désinfectante.

3017.51



Tuyau de douche complet avec  
douchette à gachette.

3017.52



Tuyau d'aspiration complet avec  
buse inox.

3017.53



Pince de préhension.

3017.54



Kit de 2 distributeurs: 1 pour le  
shampooing et 1 pour le produit  
lavant.

3017.55



Panier de rangement en acier  
inoxydable 304L brillanté pouvant  
être accroché devant ou  
en extrémité de la douche au lit.

3017.60




Kit de toilette incluant:

- Lavabo lave-mains amovible.
- Robinet à bec orientable avec mousseur.
- Bassine de toilette 4.5 l en acier inoxydable 304L.
- Adaptation possible des bassines à usage unique réf.3017.56

3017.56



Bassines de lavage à usage unique en cellulose 4L  
Conditionnement: 100pièces

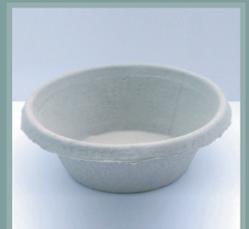

3017.57



Capiluve en ABS pour shampooing  
et soins capillaires.

3017.58



Pédiluve en ABS pour soins des  
pieds et toilette des chevilles  
et talons.